

Pro ephy®

MASQUES CHIRURGICAUX Non tissés

TYPE II EN 14683 : 2014 3 PLIS

Efficacité de Protection > 98 %
Usage unique



CE



> Utilisation

Masques de Type II selon la norme EN 14683-2014 relative aux masques chirurgicaux. Milieu hospitalier en général, centre de soins.

- Masque à haute filtration, couvre la bouche, le nez et le menton.
- Porté par la personne contagieuse, il prévient la contamination de l'entourage et de l'environnement.
- Porté par le soignant, le masque prévient la contamination du patient et de son environnement (air, surfaces, produits,...).
- Protège contre les agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes ».
- Durée d'utilisation : 3 heures.

> Mode d'emploi

Effectuer une FHA (friction alcoolique) ou se laver les mains à l'eau et au savon. Placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut et l'attacher.

Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez. Abaisser le bas du masque sous le menton.

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.

> Caractéristiques

- Matière :
 - complexe très haute filtration non tissé 3 plis, dont 1 filtre en microfibre.
 - face externe bleue en spunbond polypropylène.
 - face interne blanche hypoallergénique en thermobonded polypropylène.
- Filtre : 100 % microfibre de polypropylène sans fibre de verre.
- Barrette nasale : antibuée incorporée.
- Liens : polyester, fixations auriculaires.
- Agent liant : d'origine acrylique.
- Dimensions : longueur à plat : 175 mm x largeur à plat : 95 mm.
- Résistance aux éclaboussures : ISO22609:2004
- Respirabilité (Pression différentielle) : EN14683:2019 Annexe C < 40 Pa/cm²
- Efficacité de la filtration bactérienne : EN14683:2019 Annexe B < 98 %
- Tolérance : +/- 2 %.
- Poids : 5,1 g

Conforme à la directive Européenne 90/128/CEE.

Références normatives : Testé selon la norme EN 14683 : 2014 Annexe B et C.

Classification Type II. Efficacité de filtration bactérienne (EFB) :

- Efficacité de protection > 98 %

- Responsabilité < 29,4 Pa

Certificats TUV : 721652906-1 / 721652906-2 - 3 avril 2020



> Précautions d'emploi

Changer le masque s'il est mouillé. Bien l'ajuster : dépliage complet du masque, liens bien serrés. Procéder à une hygiène des mains après avoir mis le masque et après l'avoir enlevé. Ne pas réutiliser, ne pas le conserver autour du cou. Éliminer le masque après utilisation. Un masque doit être porté ou jeté. Stocker dans son emballage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

> Logistique

Masque	
Conditionnement	boîte de 50 pcs
Colis	2000 pcs (40 bts x 50 pcs)
Colis dimensions extérieures (cm)	52 x 38 x 34 H
Poids brut	8,1 kg
Code produit	343033

Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION